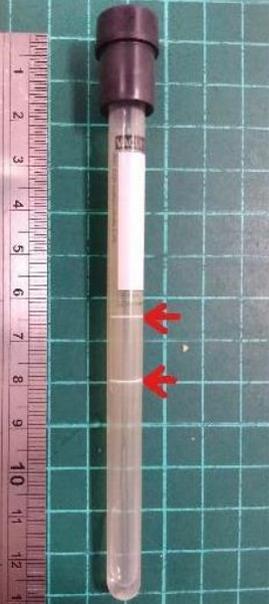
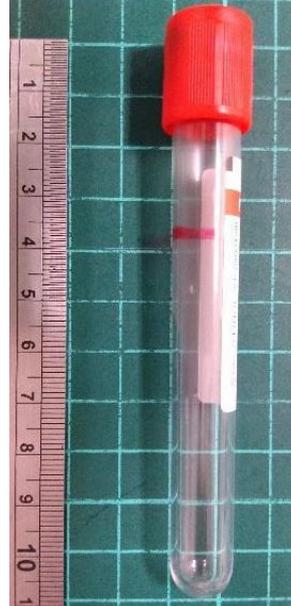
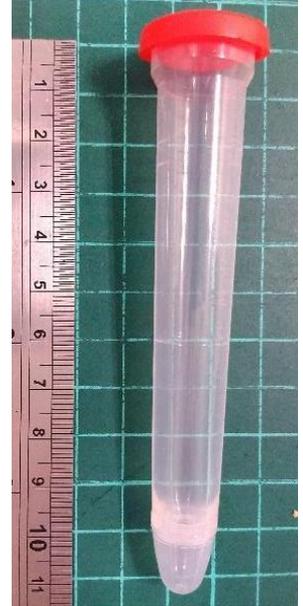
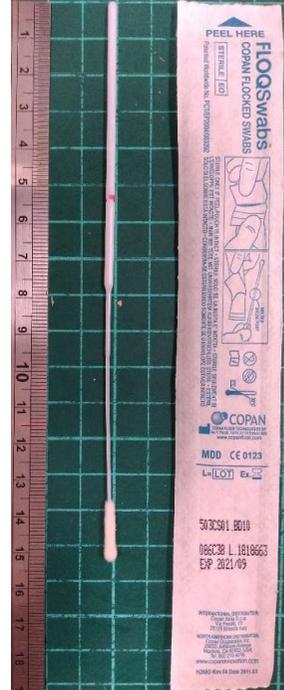
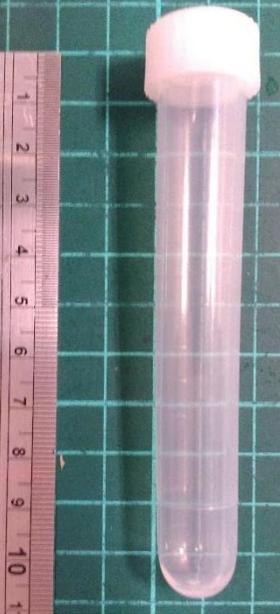



名稱	001 藍頭管	002 小兒藍頭管	003 黑頭管	004 黃頭管	005 綠頭管	006 小兒綠頭管
圖片						
內容物	3.2% Sodium citrate	3.2% Sodium citrate	3.2% Sodium citrate	促凝劑及分離膠	Li-heparin 與分離膠	Li-heparin
用途	血液凝固學檢驗	血液凝固學檢驗	紅血球沉降速率 (ESR) 檢驗	生化、免疫、分生、血清檢驗	一般與急件生化分析	一般與急件生化分析
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血量須至刻線處(2.7mL)</li> <li>採血後倒轉試管3-4次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血量須至刻線處(1.8mL)</li> <li>採血後倒轉試管3-4次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血量須在兩處刻線間</li> <li>採血後倒轉試管8-10次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血完，靜置30分鐘後離心</li> <li>採血後倒轉試管5-6次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血後倒轉試管8-10次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血後倒轉試管8-10次</li> </ol>



名稱	007 紫頭管	008 大紫頭管	009 灰頭管	010 紅頭管	011 S-Y 尿管	012 Cell-Free 白頭管
圖片						
內容物	K3EDTA	K2EDTA	Sodium Fluoride、Potassium Oxalate (5mg/4mg)	矽化物塗層	無	K3EDTA
用途	血液學、血庫檢驗、HbA1C、ACTH、G6PD 等	血庫檢驗、病毒量檢驗、HLA-B27 等	血糖、乳酸檢驗	尿液生化檢驗、懷孕試驗、cryoglobulin 等	尿液常規檢驗	DNA 專用保存管
注意事項	1. 採血後倒轉試管 8-10 次	1. 採血後倒轉試管 8-10 次 2. 採集足量 8-10mL	1. 採血後倒轉試管 8-10 次	1. 採集足量 6mL(約八分滿)	1. 採集中段尿約 10mL(八分滿)	1. 採血後倒轉試管 8-10 次 2. 採集足量 8-10mL


名稱	013 無菌痰盒	014 張氏糞便瓶	015 S-Y 糞便瓶	016 糞便潛血採便棒	017 糞便培養瓶	018 白色運送棒
圖片						
內容物	無	無	無	保存液	Buffered Glycerol Saline	Amies Agar Gel
用途	尿液培養、精液檢驗、痰液培養、糞便檢驗	阿米巴、寄生蟲檢驗	糞便常規、糞便化學檢驗	糞便潛血檢驗(免疫法)	糞便一般培養	需氧細菌培養
注意事項		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黃色扣環請勿取下</li> <li>2. 採集糞便約花生米大小</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 採集糞便約花生米大小</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 糞便須填滿採檢棒前端凹槽</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 採集糞便約花生米大小</li> <li>2. 鎖緊蓋子避免保存液漏出</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部分包含厭氧培養項目須送白+黑運送棒</li> </ol>

名稱	019 黑色運送棒	020 嗜氧血瓶	021 厭氧血瓶	022 小兒血瓶	023 黴菌血瓶	024 流感採檢棒
圖片						
內容物	Amies Agar Gel with Charcoal	Soybean-Casein Digest Broth(TSB) 、 Resin	Soybean-Casein Digest Broth(TSB)	Soybean-Casein Digest Broth(TSB) 、 Resin	7H9 Middlebrook Broth 、 Brain Heart Infusion Broth	無
用途	厭氧細菌培養	血液、透析液培養	血液、透析液培養	血液培養	血液培養	流感抗體快篩
注意事項		1. 採集足量 8-10mL	1. 採集足量 8-10mL	1. 採集足量 8-10mL	1. 採集足量 8-10mL	

名稱	025 ADV 採檢棒	026 15mL 無菌離心管	027 PP 酸洗尿管	028 紅標深藍頭管	029 紫標深藍頭管	030 集尿袋
圖片						
內容物	無	無	無	矽化物塗層	K2EDTA	無
用途	ADV 抗體快篩	體液檢驗、細菌培養	尿液重金屬檢驗	血液重金屬檢驗 (Al, Zn, Cu, Cr)	血液重金屬檢驗 (As, Hg, Cd)	24 小時尿液檢驗
注意事項		1. 採檢前以 heparin rinse	1. 注意項目為單次尿 (random) 或 24 小時尿			1. 留滿 24 小時尿液並紀錄總量於衛教單 2. 檢驗 VMA 須於集尿袋中加入鹽酸以利保存

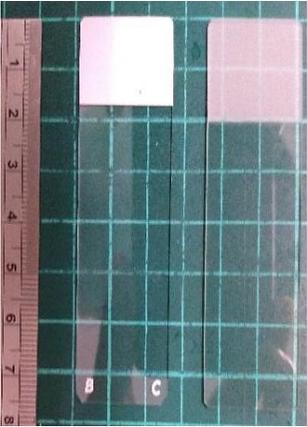名稱	031 玻片	032 病毒小管	033 ROTA 病毒小管	034 空血袋	035 罕病乾血片 (法布瑞、龐貝氏)	036 聽損基因乾血片
圖片						
內容物	無	病毒運送培養基	病毒運送培養基	無	無	無
用途	血液、細菌檢驗	病毒培養	病毒抗原檢驗	治療性放血	罕病基因篩檢	聽損基因篩檢
注意事項	1. 注意正反面區別		1. Rotavirus 專用		1. 以小綠頭管採血後製作成乾血片	

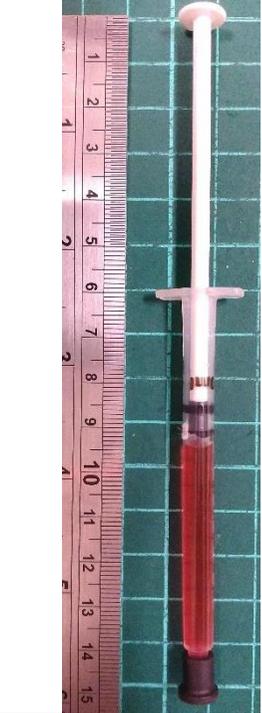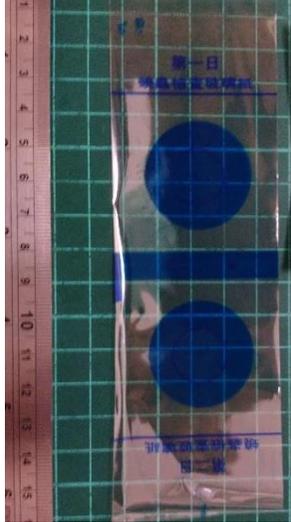名稱	037 QuantiFERON 採血套組	038 阿茲海默採血套組	039 heparin 空針	040 毛細管	041 紅頭管(含 gel)	042 燒蟲貼片
圖片						
內容物	Nil 對照、TB 抗原、Mitogen 對照	K3EDTA	heparin	無、heparin	矽化物塗層、分離膠	無
用途	結核菌感染診斷	阿茲海默症篩檢	血液氣體檢驗	小兒採血、新生兒黃疸、血型檢驗	血清、免疫檢驗	寄生蟲檢驗
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>依順序灰、紅、紫以真空採血各 1mL (至標籤黑線處)</li> <li>採血後倒轉試管 8-10 次</li> <li>37 度培養 16-24 小時後離心</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血後倒轉試管 8-10 次</li> <li>離心後分裝血漿並冷凍</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血後倒轉混合 8-10 次</li> <li>採血至少 1mL 以上，立即冰浴送檢</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>連續二日早晨採檢</li> </ol>

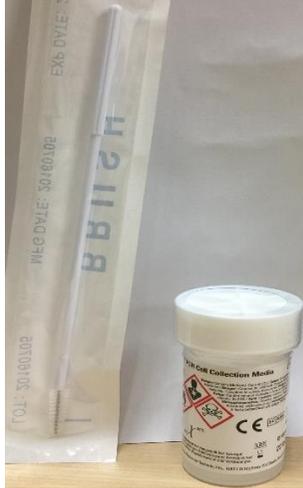名稱	043 cell-free 迷彩管	044 病毒核酸採檢組	045 病毒核酸採檢組(CMP)	046 呼氣包	047 抽管痰盒(綠)	048 HPV 採檢組
圖片						
內容物	K3EDTA	Transport medium	Transport medium	無	無	保存液
用途	DNA 專用保存管	病毒核酸檢驗	病毒核酸檢驗	碳-13 幽門螺旋桿菌檢驗	痰液培養	HPV screen
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>採血後倒轉試管 8-10 次</li> <li>採集足量 8-10mL</li> <li>訊聯專用</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>公費、自費採檢請見相關規定，或向檢驗科查詢</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>公費、自費採檢請見相關規定，或向檢驗科查詢</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>檢體保存於室溫</li> </ol>